



IN LIFE – navodila za uporabo pametne ure za uporabnike



Čestitamo! Ste uporabnik pametne ure, ki je pravzaprav majhen pametni telefon. Za vsakdanjo uporabo prilagamo navodila za uporabo nekaj osnovnih funkcij, več boste po želji izvedeli na delavnici.

Ura ima na dotik občutljiv zaslon (nanj lahko pritisnemo) in dva gumba: A (zgornji), B (spodnji).

Splošno navodilo: Na zaslon in gumba se ali klikne ali tišči. Če ne veste, najprej kliknite in če ne uspe, potem tiščite.


Uro prvič prižgemo z dolgim pritiskom na gumb A.
(To uporabimo, kadar popolnoma spraznimo baterijo.)



Koliko je ura?

Če želimo pogledati, **koliko je ura**, zaslon prižgemo s kratkim pritiskom na katerikoli gumb. S ponovnim pritiskom na gumb A zaslon ugasnemo.

Indikator stanja baterije
(strela označuje polnjenje)

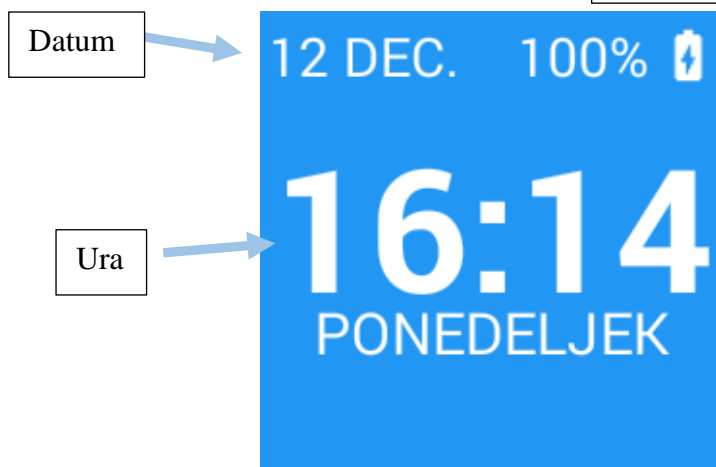

Klic na pomoč vklopimo, če tiščimo gumb A ali B.


Na zaslону se za eno sekundo pokaže leva slika, nato pa desna (klic). Če je linija zasedena, se klic samodejno ponavlja.



Če si premislimo, klic prekinemo s klikom na rdečo slušalko na zaslону. Potem tiščimo na rdeč ? zaslon.

Samodejno zaznavanje padcev in nevarnosti

Če se alarm samodejno sproži, se pokaže spodnji zaslon (vprašaj na rdečem polju). Alarm lahko izklopimo z daljšim pritiskom na zaslon (zaslon postane zelen, nato pa spet pokaže čas).

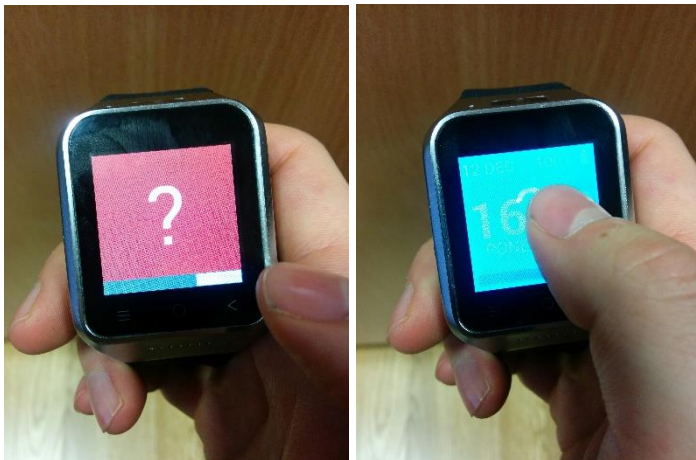

Ura prikazuje tudi obvestila. Če želimo prikazano obvestilo odstraniti, to storimo s klikom na zaslon.



Ker je ura hkrati tudi telefon, lahko sprejemamo klice. Če nas nekdo pokliče, se prikaže sledeči zaslon.



Zaslon pokaže ime osebe, ki nas kliče. Klic **sprejmemo** s klikom na zeleno slušalko (levo spodaj). Pogovarjamo se tako, da uro približamo ustom.

Klic **zavrnamo** ali **prekinemo** s klikom na rdečo slušalko (desno spodaj).



Uro je potrebno polniti enkrat dnevno ali ko je baterija prazna. Takrat se indikator polnosti baterije obarva rdeče.

Polnjenje ure s priloženim polnilcem prikazujeta spodnji sliki.



Privzeta aplikacija

IN LIFE aplikacija je nastavljena kot privzet domač zaslon, to aplikaciji omogoča, da se ob morebitnem ponovnem zagonu naprave samodejno zažene ter postavi na osnovni zaslon. Včasih se zgodi, da ura ponudi ponovno izbiro privzete aplikacije. V tem primeru pritisnite na ikono »**InLife Fall Detection**« nato pa na gumb »**Always**«.

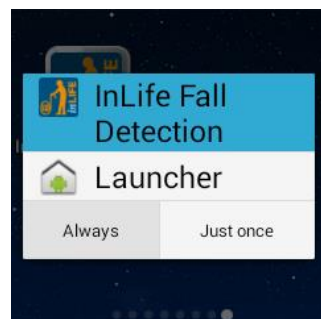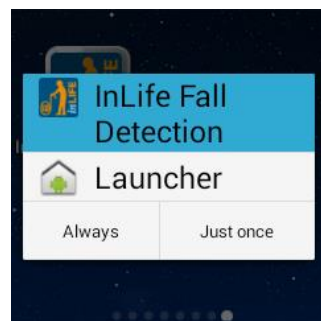

Ure ne najdem

1. S telefonom pokličite telefonsko številko vaše ure, ura se bo začela oglašati.
2. Kontaktirajte skrbnika.

Ura se oglašá

Če ure ne nosite, si jo nadenite na roko ali kontaktirajte skrbnika.

Če je ura na roki:

1. Preverite stanje baterije in jo po potrebi napolnite.
2. Preverite, ali ste prejeli opomnik. Opomnik potrdite s pritiskom na zaslon.

Kako izklopim uro

Kontaktirajte skrbnika.

Kako vrnem uro na domači zaslon (zaslon s prikazom časa)

Pritisnite na gumb C (označen z rumenim krogcem na sliki na prvi strani), ter se po potrebi premaknite iz nastavitvev na zaslon z uro (potegnite zaslon v levo).

Ura se ne odziva

1. Priklopite uro na polnilec. Počakajte nekaj minut in jo poskusite ponovno prižgati.
2. Če se ura še vedno ne odziva, kontaktirajte skrbnika.