




## IN LIFE – navodila za uporabo pametne ure za uporabnike

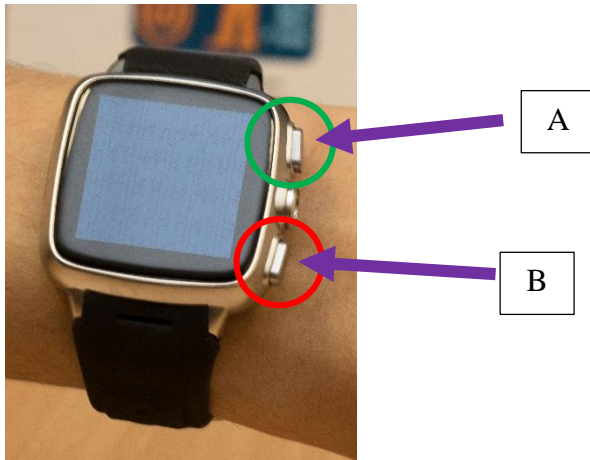

Čestitamo! Ste uporabnik pametne ure. Ta naprava je pravzaprav majhen pametni telefon. Za vsakdanjo uporabo prilagamo navodila za uporabo nekaj osnovnih funkcij, več boste po želji izvedeli na delavnici. Ura je lahko črna, rdeča, oranžna, itd.

Naprava ima na dotik občutljiv zaslon (nanj lahko pritisnemo) in dva gumba: A (zgornji), B (spodnji).



Splošno navodilo: Na zaslon in gumba se ali klikne ali tišči. Če ne veste, najprej kliknite in če ne uspe, potem tiščite.

## Napravo prvič prižgemo z dolgim pritiskom na gumb A.

(To uporabimo le, kadar popolnoma spraznimo baterijo. Če je ura prižgana, ne tiščite gumba A, da ne izklopite programa.)




V primeru, da ura po prižigu ne preklopi v način IN LIFE, to storite tako, da potegnete zaslon v levo ter iz seznama izberete ikono IN LIFE.

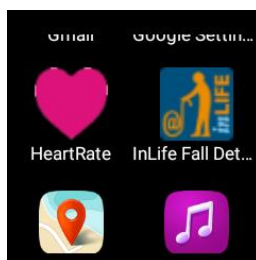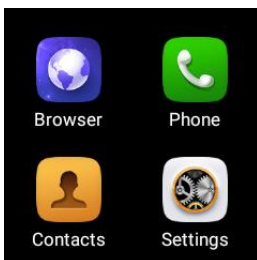


## Koliko je ura?

Če želimo pogledati, **koliko je ura**, zaslon prižgemo s kratkim pritiskom na katerikoli gumb. S ponovnim pritiskom na gumb A zaslon ugasnemo.

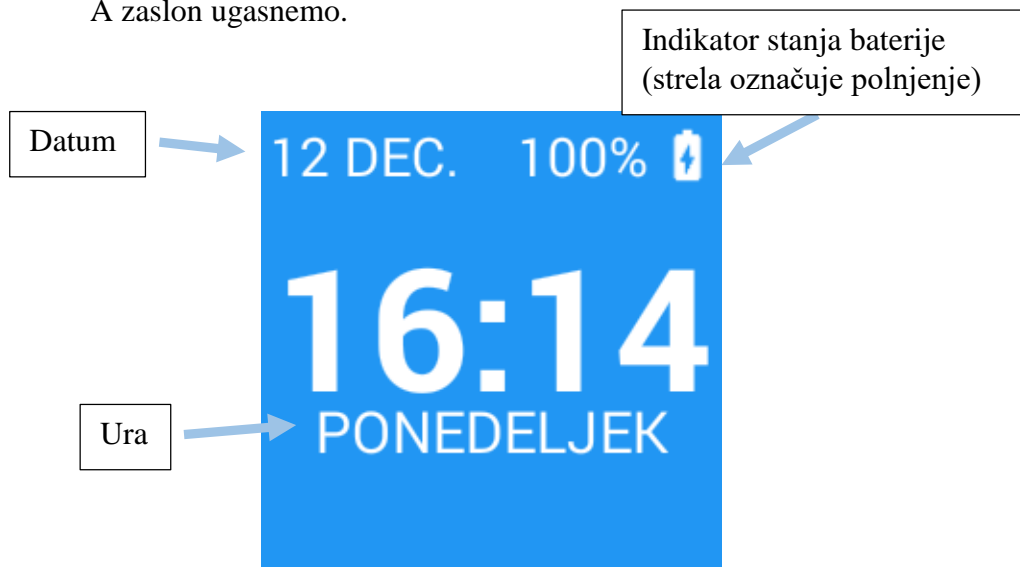

**Klic na pomoč vklopimo, če prižgemo zaslon in nato tiščimo gumb B.**

Na zaslonu se za eno sekundo pokaže leva slika, nato pa desna (klic). Če je linija zasedena, se klic samodejno ponavlja.

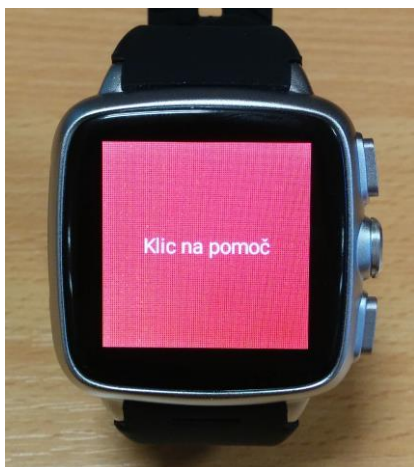

Če si premislimo, klic prekinemo s klikom na rdečo slušalko na zaslonu. Potem tiščimo na rdeč zaslon.

### **Samodejno zaznavanje padcev in nevarnosti**


Če se alarm samodejno sproži, se pokaže spodnji zaslon (vprašaj na rdečem polju). Alarm lahko izklopimo z daljšim pritiskom na zaslon (zaslon postane zelen, nato pa spet pokaže čas).



**Ura prikazuje tudi obvestila. Če želimo prikazano obvestilo odstraniti, to storimo s pritiskom na zaslon.**



**Ker je ura hkrati tudi telefon, lahko sprejemamo klice. Če nas nekdo pokliče, se prikaže sledeči zaslon.**

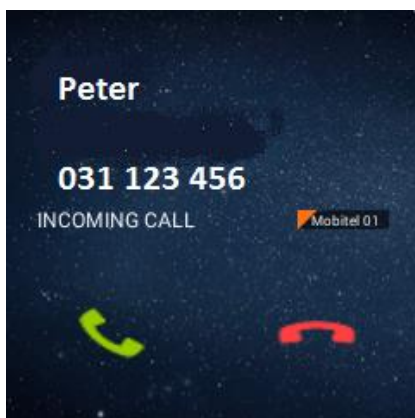

Zaslon pokaže ime osebe, ki nas kliče. Klic **sprejmemo** s pritiskom na zeleno slušalko (levo spodaj). Pogovarjamo se tako, da uro približamo ustom.

Klic **zavrnamo** ali **prekinemo** s pritiskom na rdečo slušalko (desno spodaj).

**Uro je potrebno polniti enkrat dnevno ali ko je baterija prazna.** Takrat se indikator polnosti baterije obarva rdeče.

**Polnjenje ure s priloženim polnilcem prikazujeta spodnji sliki.** Črno ploščico, na katero je pritrjen električni kabel, položimo na spodnjo stran ure, tako da se kontakti stikajo.



## **Ure ne najdem**

1. S telefonom pokličite telefonsko številko vaše ure, ura se bo začela oglašati.
2. Kontaktirajte skrbnika.

## **Ura se oglašá**

Če ure ne nosite, si jo nadenite na roko ali kontaktirajte skrbnika.

Če je ura na roki:

1. Preverite stanje baterije in jo po potrebi napolnite.
2. Preverite, ali ste prejeli opomnik. Opomnik potrdite s pritiskom na zaslon.

## **Kako izklopim uro**

Kontaktirajte skrbnika.

## **Kako vrnem uro na domači zaslon (zaslon s prikazom časa)**

Pritisnite na gumb A, ter se po potrebi premaknite iz nastavitav na zaslon z uro (potegnite zaslon v levo).

## **Ura se ne odziva**

1. Priklopite uro na polnilec. Počakajte nekaj minut in jo poskusite ponovno prižgati.
2. Če se ura še vedno ne odziva, kontaktirajte skrbnika.